



## Gebrauchsanweisung für Patienten für alle Alpha-Liner

### Anlegen des Liners

Der Stumpf muss vor dem Anlegen des Liners sauber, trocken und frei von Seifenrückständen sein. Offene Wunden und Hautverletzungen müssen abgedeckt werden. Tragen Sie auf den Stumpf oder den Alpha Liner keine Lotion oder Puder auf, da diese Produkte den Liner beschädigen können.



**1.** Drehen Sie den Liner so, dass die Silikon- bzw. Gel-Seite nach aussen zeigt und legen Sie das Liner-Ende ans Ende des Stumpfes. Bei der Verwendung eines Locking-Liners muss der Arretierungspin in Stumpfachse ausgerichtet und zentriert auf dem Stumpfende anliegen. Das Logo und die Seriennummer müssen nach vorne weisen.



**2.** Rollen Sie den Liner vorsichtig mit der Silikon- bzw. Gel-Seite zur Haut auf den Stumpf.



**3.** Ziehen Sie den Liner NICHT über den Stumpf. Wenn Sie den Liner ziehen, kann dies zu einer Dehnung der Haut und unbequemem Sitz, sowie Hautirritationen und Blasenbildung führen.



**4.** Vergewissern Sie sich, dass weder die Haut noch der Liner Falten aufweisen und sich zwischen Liner und Stumpf keine Luft einschlüsse befinden. Legen Sie dann die Prothese an.

### Tägliche Reinigung und Trocknung

Die richtige Hygiene ist bei der Verwendung des Alpha Liners sehr wichtig. Der Liner muss einmal täglich nach der Abnahme gründlich gereinigt und einmal wöchentlich desinfiziert werden. Es wird die Verwendung von zwei Linern empfohlen, damit der eine getragen werden kann, während der andere nach der Reinigung trocknet.



**1.** Drehen Sie den Liner so, dass die Silikon- bzw. Gel-Seite nach aussen zeigt und reinigen Sie den Liner gründlich mit lauwarmem Wasser und einer pH-neutralen, unparfümierten Körperseife, die bei Ihnen keine Hautreizungen hervorruft. Tragen Sie die Seifenlösung mit einem sauberen, weichen Lappen oder Schwamm auf.




**Hinweis:** Reiben Sie den Alpha Liner nicht ab. Durch das Abreiben kann die Oberfläche des Liners aufgeraut werden, was die Haut reizen kann.

**2.** Spülen Sie die Seifenlösungsreste mit Wasser vom Liner ab.




**3.** Trocknen Sie das Silikon- bzw. Gel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.

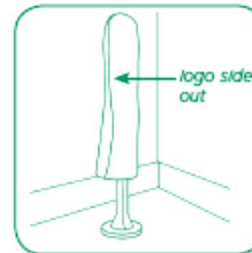


**4.** Hängen Sie den Liner mit der Stoffseite nach aussen über den Trockenständer.

Reinigen Sie den Stumpf mit Seife und spülen Sie ihn gründlich ab.

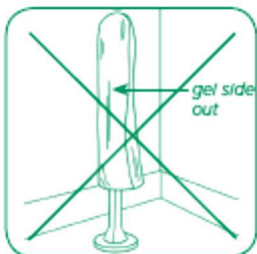


**ACHTUNG:** Die Trocknung mit der Silikon- bzw. Gel-Seite nach aussen beschädigt den Liner.

## Verwendung des Alpha-Versandständers als Trockenständer

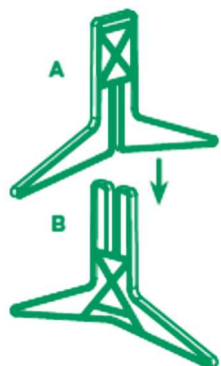

Der Trockenständer wird aus zwei beigelegten Basiskomponenten und dem Rohr montiert. Beginnen Sie mit dem Zusammenbau, indem Sie die Kerbe von Teil A in die Kerbe von Teil B schieben.

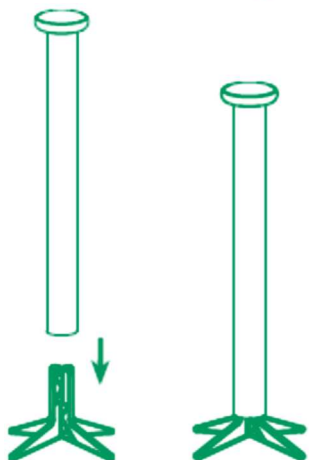

Danach schieben Sie das Rohr auf den zusammengebauten Fuss. Wenn Sie einen kürzeren Trockenständer für kürzere Liner möchten, schneiden Sie das Rohr einfach in die gewünschte Länge, bevor Sie das Rohr auf den Fuss montieren.


## Wöchentliche Desinfektion



1. Geben Sie eine kleine Menge Ethyl oder Isopropanol auf ein weiches, sauberes Tuch. Wischen Sie die Silikon- bzw. Gel-Seite des Liners zwei Minuten lang leicht mit dem Tuch ab.



2. Spülen Sie den Alkohol mit Wasser von dem Liner ab.

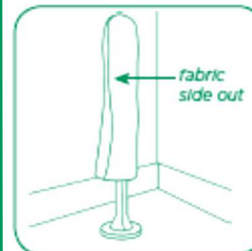

3. Hängen Sie den Liner mit der Stoffseite nach aussen über den Trockenständer.

**Hinweis:** Tränken Sie den Liner nicht mit Ethyl oder Isopropanol. Der Liner kann durch längeren Kontakt mit Ethyl oder Isopropanol verspröden.

## Lagerung des Liners

Der Liner sollte bei Nichtgebrauch kühl und trocken gelagert werden. Bei längerem Nichtgebrauch muss der trockene Liner mit einer sauberen Plastiktüte abgedeckt werden.

## Transpiration

Falls Sie bei Aktivitäten übermässig schwitzen, nehmen Sie den Liner regelmässig ab und trocknen sowohl den Stumpf als auch den Liner, um ein Verrutschen des Liners auf dem Stumpf zu vermeiden.