

Dispositivo Medico Registrato
nel Ministero della Salute
Registrato Repertorio SSN

 **semededa**[®]
ORTHOPAEDIC PRODUCTS
Specialisti nel piede torto

Collaudato
da più di
20 anni
in tutto
il mondo

PONSETI

ALFA-Flex[®] Brace

ALFA-Flex[®] Light Brace **NOVITÀ!**

BETA-Flex[®] Brace

ECO-Brace Light

COMFOOT[®] Calzature

Calzature di pelle Henry

COMPETENZA NELLA FORMAZIONE

Video: Seguite un trattamento

Ponseti dal primo modello di gesso
fino al trattamento con Tutore.

ACCESSORI

Calzine

Cuscinetti per tallone

Calendario del tutore

CATALOGO DEI PRODOTTI

Indice

Tutori piede torto

Pag. 4 Tutore ALFA-Flex® Brace

Pag. 6 Tutore ALFA-Flex® Brace XL

Pag. 8 Tutore leggero ALFA-Flex® Light Brace **NOVITÀ!**

Pag. 10 Tutore BETA-Flex® Brace

Pag. 13 Tutore ECO-Brace Light

Calzature

Pag. 15..... COMFOOT® Shoes

Pag. 16 COMFOOT®-Blue

Pag. 17..... COMFOOT®-White

Pag. 19 Talloniera in silicone

Pag. 20 Calzature di pelle Henry

Accessori ed extra

Pag. 23..... Semeda Cuscinetti per tallone

Pag. 24 Naturapura Calzine

Pag. 25..... C.A.T.S. - Cast Application Training Set Per Addestramento

Pag. 26 Informazioni per i genitori e calendario del tutore

Pag. 27..... Opzioni di ordinazione



TUTORI



In ca. il 90% dei casi il piede torto congenito può essere trattato con una terapia conservativa, senza interventi chirurgici importanti, applicando il **metodo Ponseti**. Per evitare recidive dopo il gesso, il piede torto deve essere dotata di ortesi specifica. L'ortesi ALFA-FLEX per piede torto comprende un tutore ALFA-FLEX e calzature intercambiabili. Questa ortesi molto facile da utilizzare (maggiore aderenza alla terapia da parte dei pazienti) può essere adattata in modo molto preciso all'angolazione terapeutica richiesta dal metodo Ponseti (abduzione ed estensione dorsale) e contribuisce in modo significativo al buon esito del trattamento.

ALFA-Flex®

- > Design
Colorato e attento alle esigenze dei bambini per una maggiore adesione
- > Sistema a scatto
Fissa tutore e calzature con un clic

Articolo n° AL 0700-000
RDM: 2949518/R



- > Giunti sferici
Mobilità massima nell'ambito della terapia
- > Angolo di abduzione
Regolabile da 0° a 80°



- > Estensione dorsale
Regolabile da 0° a 20°
- > Lunghezza del tutore:
Il tutore è utilizzabile per tutta la durata del trattamento grazie alla lunghezza regolabile del tutore da 17,5 cm a 30 cm

Tutore piede torto / ALFA-Flex® Brace XL



37 cm

Appositamente messo a punto per bambini più grandi

Il tutore per piede torto ALFA-FLEX XL può essere esteso fino alla larghezza massima di 37 cm.

Come **sistema** ALFA-Flex XL è disponibile come tutore completo per piede torto. (consigliato come iniziate ortesi temporanea a partire dalla misura della scarpa 150).



Articolo n° AL 0700-0XL

ALFA-Flex® XL
da 18,5 cm a 37 cm

L'Ovale Centrale XL

Se necessario è possibile estendere un tutore con l'Ovale Centrale XL. In questo modo è possibile utilizzare il materiale esistente e cambiare soltanto l'ovale centrale.



Articolo n°:AL 0700-1XL

Imbottitura del tutore

Secondo il grado di attività del bambino, il bambino stesso o i genitori possono inciampare nel tutore. Appena il bambino comincia a gattonare o ad alzarsi in piedi con il tutore è sempre possibile danneggiare i mobili o il pavimento. L'imbottitura del tutore con speciale Imbottitura ALFA-Flex evita che accada. L'imbottitura del tutore è di neoprene lavabile e viene fornita completa di una pratica fascetta a strappo per fissare l'imbottitura quando il bambino indossa il tutore.



Articolo n° AL 0700-001

NOVITÀ!

ALFA-Flex Light

Non è solo un piccolo kit, ma una grande soluzione.

Il tutore ALFA-Flex Light e la Mini Barra inclusa nella fornitura coprono una gamma di situazioni terapeutiche. La mini barra Semeda Mini Bar è particolarmente adatta per i primi 4-8 mesi. La barra di lunghezza regolabile può essere utilizzata in seguito fino al termine della terapia. Pertanto un kit è sufficiente per tutta la durata del trattamento - pratico, conveniente e sostenibile.



Articolo n° AL 2400-000
RDM: 2950176/R



Solo 117 g con la mini barra Semeda Mini bar (sempre compresa nel kit)



Per saperne di più:
Guarda il video
sul nostro canale
YouTube



Angoli precisi,
compresa abduzione a 0° ed
estensione dorsale per piedi sani



**Qualità, prodotto
fabbricato in Germania**

Sviluppato e prodotto in Germania, è particolarmente durevole e robusto - e si adegua in modo affidabile a qualsiasi condizione terapeutica.

Peso contenuto, forte impatto

Più è leggero il tutore e più confortevole risulterà la terapia

Insieme alla mini barra Semeda Mini Bar, il tutore piede torto ALFA-Flex Light pesa soltanto 117 g. Infatti è il tutore più leggero al mondo con estensione dorsale regolabile. Ideale per i primi 4-8 mesi di trattamento con il tutore.



“Grazie ad ALFA-Flex Light con mini barra il nostro bimbo riesce di nuovo a sollevare piedi e tutore senza difficoltà - un grosso passo avanti verso la libertà di movimento.” MICHAELA Z.

I piedi preferiscono la precisione

L'estensione dorsale è regolabile con flessibilità da 0° a 20°. Particolarmente utile in caso di piede torto unilaterale in quanto permette di scaricare il piede sano a 0°. L'angolo di abduzione può essere regolato con precisione tra 0° e 80°.

Imbottitura protettiva Semeda

Se necessario il tutore può essere imbottito con una protezione in neoprene lavabile.



Dati tecnici per ALFA-Flex Light	
Lunghezza con mini barra Semeda Mini bar	18 cm
Peso con la mini staffa Semeda Mini Steg	117 g
Lunghezza con barra regolabile	20 - 29 cm
Peso con barra regolabile	157 g
Gamma di angolazione in abduzione	0° - 80°
Gamma di estensione dorsale	0° - 20°

BETA-Flex® Brace

Il tutore dinamico con più libertà di movimento

Il tutore BETA-Flex consente di scalciare e di gattonare, anche durante il trattamento con il tutore. Ciò significa più libertà di movimento con totale funzionalità della terapia. Un maggiore comfort favorisce il processo di familiarizzazione e aumenta il grado di accettazione del tutore. Questo concetto innovativo di tutore è stato messo a punto in collaborazione con medici specializzati.



Prodotto brevettato e unico

Due giunti a molla consentono al bambino di scalciare e di gattonare durante il trattamento con tutore. Le forze di richiamo fanno sì che i piedi vengano sempre riallineati nella posizione terapeutica desiderata. Se necessario, il tutore flessibile BETA-Flex può essere sostituito con un sistema a tutore fisso mediante un pratico perno di fermo.

Brevetto europeo n° 2 904 993

MOBILE



CRC CRESCERE INSIEME

Articolo n° BE 0600-000
RDM: 2950187/R

Estensibile

Un unico tutore per tutta la durata del trattamento grazie alla possibilità di regolazione continua da 20,5 a 29,5 cm.



Forza di richiamo che tiene conto dell'età

La forza di richiamo dei giunti mobili è regolabile mediante due differenti gradi di elasticità della molla secondo l'età del bambino.



Gli angoli secondo Ponseti

L'angolo di abduzione può essere impostato tra 0° e 70°; l'estensione dorsale è fissata a 5° nella zona di trattamento. Se necessario il tutore BETA-Flex mobile può essere convertito in un sistema a tutore rigido mediante un semplice perno di blocco.



BETA-Flex Mini

Lungo solo 18 cm e con 40 grammi di peso in meno rispetto alla misura standard: su richiesta è disponibile un elemento centrale per il tutore, particolarmente piccolo e leggero. Man mano che il bambino cresce l'elemento centrale viene semplicemente sostituito con un modulo standard a lunghezza regolabile.

Articolo n° BE 0600-002



BETA-Flex Imbottitura del tutore

Con l'imbottitura del tutore BETA-Flex di neoprene lavabile è possibile imbottire facilmente il tutore. Protegendo genitori, bambino e pavimento. L'imbottitura è fissata mediante una pratica fascetta a strappo.

Articolo n° BE 0600-001

Che cosa dicono i genitori a proposito di BETA-Flex



Sig. C., Plauen

"Questa mobilità è eccezionale. Già durante la prima notte è andata molto meglio. Niente più lotte a causa del tutore - nessuna lesione da pressione, niente dolore, il bambino è felice!"

Sig.ra H., Amburgo

"Voglio ringraziarvi di tutto cuore per aver dato a nostro figlio il tutore BETA-Flex. Con questo tutore non abbiamo più avuto problemi, l'ha accettato subito. Questo tutore è un grosso passo avanti. Noi siamo davvero contenti."

subito. Questo tutore è un grosso passo avanti. Noi siamo davvero contenti."

Tutore ECO-Brace Light

Progettato per un trattamento Ponseti efficace e a costi contenuti



L'ortosi ECO-Brace Light può essere applicata a bambini di età fino a 4 o 5 anni. La barra, di plastica rinforzata con fibra di vetro, fa di ECO-Brace Light un tutore particolarmente leggero - la versione standard pesa solo 139 g. Grazie al peso contenuto e alla facilità di applicazione viene accettato subito sia dai genitori che dai bambini in questa importante fase della terapia.

Articolo n° EC 0500-002
RDM: 2956456/R

Solido e leggero

Realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Foro allungato per facilitare la regolazione continua della larghezza

Minori costi

Un unico tutore per tutto il periodo di trattamento. Il tutore che cresce con il paziente. La lunghezza del tutore può essere adattata alla larghezza delle spalle del bambino.

Semplice da adattare

Si adatta rapidamente e con precisione all'angolo di trattamento. L'angolo di abduzione può essere regolato entro la gamma di trattamento da 0° a 80° in incrementi di 10°. L'estensione dorsale è impostata a un angolo medio di trattamento di 10°.



Dati tecnici per ECO-Brace Light		
	Peso	Lunghezza
Tutore ECO-Brace Light	139 g	20,5 - 29 cm
ECO-Brace Light Tutore leggero (corto)	124 g	15 - 22,5 cm

COMFOOT-Shoe®



Esiste una scarpa che si adatti bene al piede sensibile di un neonato e che offra anche una messa insicurezza ottimale del piede?

La nostra risposta a questa domanda è la calzatura con fasce COMFOOT. Questo innovativo concetto di calzatura è stato messo a punto con medici e tecnici specializzati. Coniuga un modello studiato per tomaia ed avampiede, con fasce in materiale elastico. Il risultato è una vestibilità migliorata che si adatta al piede di ciascun bambino. La calzatura con fasce è disponibile in due diversi modelli, con possibilità di scegliere la calzatura COMFOOT-Blue o COMFOOT-White. **Tutti i modelli sono adatti ai tutori Semeda.**

Nota bene: Non si tratta di calzature ortopediche "vere e proprie", ossia non sono adatte per camminare, in quanto hanno una suola fissa, liscia. Sono semplicemente un supporto per il piede in modo da fissarlo al tutore. Del resto, senza il tutore, le calzature non hanno alcun uso medico.

CALZATURE

COMFOOT-Blue

Il materiale delle fasce offre una vestibilità ottima e comoda, fissando in modo sicuro i piedini. Si infilano in fretta grazie ai cinturini a scatto.

- **1 cinturino con fibbia, 2 cinturini a strappo**
Morbida tomaia realizzata con materiale delle fasce
- **Il materiale delle fasce di fissaggio si adatta perfettamente e offre un supporto eccellente anche per piedi piccoli.**
- **Adatto per piedi che sudano molto, grazie alla soletta igienica.**
- **Soletta con alette laterali perfetta per piedi stretti. Le alette laterali possono essere rifilate per piedi larghi.**

Colore: blu

Misura: 070-180 (lunghezza del piede in mm)
Misure disponibili in incrementi di 10 mm.



COMFOOT-Blue®

Articolo n° CB 1811 + misura + lato
RDM: 2950145/R

COMFOOT-White®

Articolo n° CW 1833 + misura + lato
RDM: 2950163/R



COMFOOT-White®

Il materiale delle fasce di fissaggio si adatta perfettamente e offre un supporto ottimale anche per piedi piccoli. I cinturini con fibbia sono difficili da aprire per i bambini.

Colore: bianco

Misura: 070-180 (lunghezza del piede in mm)
Misure disponibili in incrementi di 10 mm.

- **3 cinturini con fibbia, difficili da aprire anche per bambini più grandicelli.**
- **Il materiale delle fasce si adatta perfettamente e offre un supporto ottimale anche per piedi piccoli.**
- **Adatto per piedi che sudano molto, grazie alla soletta igienica.**
- **Soletta con alette laterali perfetta per piedi stretti. Le alette laterali si possono rifilare per piedi larghi.**



Vantaggi delle calzature COMFOOT

Comodità



Materiale delle fasce di fissaggio elasticizzato per una migliore vestibilità che mantiene la forma

Sicurezza



Apertura molto ampia sul tallone per controllo visivo della posizione del piede

Stabilità



Tomaia e avampiede preformati base in gomma, che mantiene perfettamente in posizione i piedini

Praticità



Accesso ampio per facilitare la manipolazione

Possibilità di regolazione



Principio della larghezza regolabile, adatto per piedi stretti, standard e molto larghi. Imbottitura del cinturino sostituibile disponibile in due colori (azzurro, rosa)

Clic!




Le calzature si possono collegare al tutore con un pratico sistema di fissaggio a scatto

Extra!

Per una perfetta distribuzione della pressione

Semeda Cuscinetti anti-pressione in silicone

Cuscinetti a pressione in silicone di forma ergonomica garantiscono la distribuzione ottimale della pressione su tutto il piede. Disponibili in tre misure. Ogni modello Comfoot fino alla misura 140 comprende automaticamente un cuscinetto a pressione Semeda gratuito.

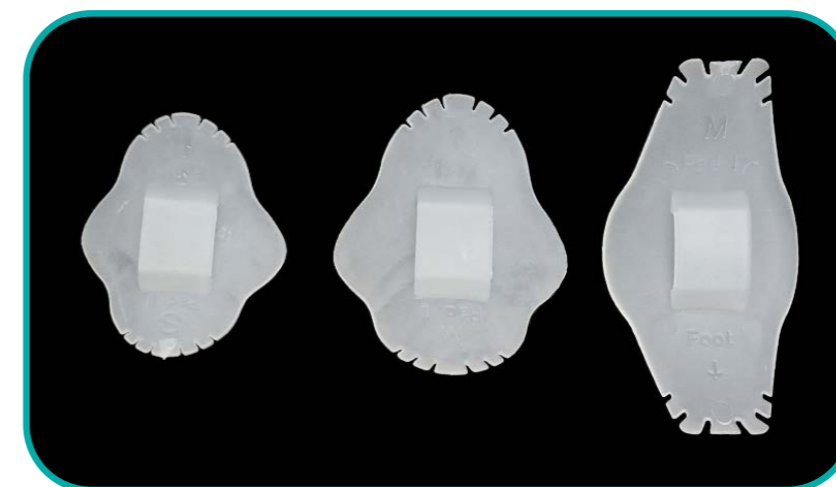

Misura 70 - 80	Misura 90 - 110	Misura 120 - 140
Articolo n°: MP-2202-002	Articolo n°: MP-2202-001	Articolo n°: MP-2201-001

Forma anatomica

Materiale dermocompatibile

Accorciabile secondo necessità

Adatto per realizzare ortesi personalizzate

Allevia la pressione sull'arcata plantare

Riduce la pressione

Migliora il comfort

Migliora il fissaggio del piede

Calzature in pelle Henry



Qualità

Le calzature sono realizzate esclusivamente in pelle di vitello molto morbida



Imbottitura

La schiuma viscoelastica con memoria di forma allevia la pressione



Stabilità

Il profilo del tallone e la cinghia centrale fissano correttamente il piede



Sicurezza

La posizione corretta del piede nella scarpa può essere verificato grazie all'apertura sul tallone



Compatibilità

Le calzature si infilano facilmente grazie all'ampia apertura con fascetta



Clic

Le calzature si possono collegare al tutore mediante un pratico sistema a scatto

Il compito della calzatura ALFA-Flex Henry è quello di mantenere i piedi sensibili del bambino nella posizione imposta dai tutori. Affidabili e sicure - e particolarmente delicate. Devono superare la prova dell'uso quotidiano. Infatti abbiamo messo a punto Henry in collaborazione con medici e tecnici ortopedici. Tutte le calzature sono biocompatibili e prive di sostanze nocive. Henry è adatta per tutti i tutori Sameda.

Nota bene: Non si tratta di calzature ortopediche "vere e proprie", ossia non sono adatte per camminare, in quanto hanno una suola fissa, liscia. La funzione delle calzature è semplicemente quella di fissare il piede al tutore. Del resto, senza il tutore, le calzature non hanno alcun uso medico.

Henry

Articolo n° AL 1411 + Misura + lato
RDM: 2950128/R



Il robusto profilo del tallone e il prolungamento laterale offrono ulteriore sicurezza per i bambini ai quali piace tirare calci e che spesso scivolano fuori dalle scarpe.

Colore: blu

Misura: 070-210 (lunghezza del piede in mm)
Misure disponibili in incrementi di 10 mm.

- 1 cinturino con fibbia, 2 graffe a scatto per un'apertura rapida e semplice
- Copertura interna più robusta
- Profilo del tallone più robusto
- Prolungamento laterale per migliorare il comfort dell'avampiede

ALFA-SOFT Talloniera

Innovativa talloniera per il fissaggio ottimale in caso di "tallone che scivola", di bambini iperattivi e di cute del neonato particolarmente sensibile.

Per il successo della terapia Ponseti è molto importante che il piede del bambino si mantenga esattamente nella posizione corretta. In pratica, molte circostanze possono rendere difficoltoso il fissaggio terapeutico ideale. Per esempio in caso di cute del neonato particolarmente sensibile (es. cute arrossata), o di "talloni che scivolano" e di bambini iperattivi.

La soluzione è la **talloniera Sameda ALFA-SOFT**: Rapida e facile da applicare alla calzatura, si può ritagliare su misura, offre ulteriore fissaggio ed evita o allevia i punti di pressione.

ACCESSORIES & EXTRAS



Tenuta ottimizzata



Forma terapeutica anatomica



Nessuna pressione sul tallone di Achille



Adattabile individualmente



Particolarmente ben tollerata dalla cute



Disponibile in due misure



Talloniera 1

Misura: piccola, consigliata per misura delle calzature 70 - 100 mm

Articolo n° AL 1700-001

Talloniera 2

Misura: grande, consigliata per misura delle calzature oltre 110 mm

Articolo n° AL 1700-002

Calzine prodotte da

NATURAPURA®
THE PURELY ECOLOGICAL BRAND

Particolarmente raccomandate da Sameda. Le calzine sono molto importanti per proteggere la pelle sensibile dei bambini quando indossano i tutori durante la notte. Le calzine speciali di Naturapura hanno dato ottimi risultati nell'uso pratico e si distinguono per le seguenti caratteristiche:

Comfort



Il rischio di punti di pressione è ridotto grazie a calzine quasi prive di cuciture

Spessore del materiale



Disponibile nella versione calzina sottile e calzina termica

Buona vestibilità



Una buona vestibilità ed elasticità sono importanti per garantire che non si formino pieghe nella scarpa

Materiale naturale, dermocompatibile



Le calzine sono realizzate in 98 % cotone da coltivazione ecologica, non sbiancato e non tinto, più 2 % elasthan



calzina termica

calzina sottile

C.A.T.S. - Cast Application Training Set

(Kit di addestramento all'applicazione di gessi)

C.A.T.S. - L'esercizio fa la differenza!

Grazie al kit di addestramento Cast Application Training Set (C.A.T.S.) di Sameda potrete provare e fare pratica nella correzione del piede torto e della successiva applicazione di gesso nella vostra attività clinica. Il kit comprende due gambe di bambini di forma anatomica, realizzate in polietilene - una con piede torto non corretto e una con piede torto parzialmente corretto. Perfetto per seminari, come oggetto da mostrare e per supportare la conoscenza pratica del metodo.

Pratico, anatomico
per dimostrazione
e applicazione pratica




Ogni partecipante può portarsi a casa un modello della gamba con gesso correttivo




Articolo n°: CA 1600-001



Articolo n°: CA 1600-002

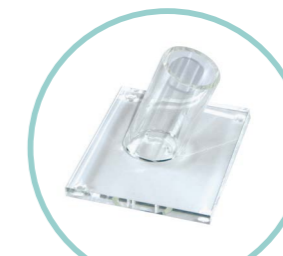

Articolo n°: CA 1600-003

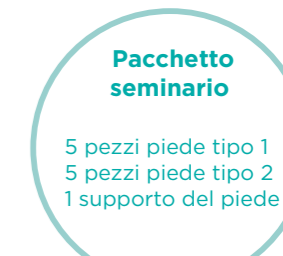

Articolo n°: CA 1600-000

Pacchetto
seminario

5 pezzi piede tipo 1
5 pezzi piede tipo 2
1 supporto del piede

Età	0/3 mesi	3/6 mesi	6/12 mesi	12/24 mesi
Lunghezza del piede in mm	70/80	80/90	100/110	120-140
Misura UE	14	15/16	17/18	19/20
Calzine sottili, Art. n°	NP 2055-001	NP 2055-002	NP 2055-003	NP 2055-004
Calzini termici, Art. n°	NP 2066-001	NP 2066-002	NP 2066-003	NP 2066-004

Video - Metodo, prodotti, informazioni di base

Nel nostro sito e sul nostro canale YouTube troverete molti video relativi al metodo Ponseti, dalla correzione su modello dell'osso al trattamento con gesso e tutore. Troverete anche utili informazioni di riferimento sui prodotti e utili dichiarazioni di esperienze pratiche. Assicuratevi di fare un'occhiata! Gli articoli sono disponibili anche nel nostro sito Internet www.semada.de nella rubrica Service/Videos.



Da qui raggiungete
direttamente il nostro
canale YouTube



Per la massima aderenza al trattamento Informazioni per i genitori in molte lingue

Il successo della terapia basata sul metodo Ponseti si basa fondamentalmente sulla collaborazione dei genitori in quanto solo grazie al trattamento costante con il tutore, effettuato secondo il programma terapeutico, si riduce al minimo il rischio di recidive. Per la massima aderenza al trattamento Sameda ha raccolto i principali suggerimenti e le informazioni relative al trattamento con tutore per i genitori interessati.

Su richiesta saremo lieti di inviarvi una serie di informazioni per i genitori in occasione del vostro prossimo ordine.

Monitoraggio dei tempi di applicazione Calendario tutore Sameda

Il Calendario del tutore sul retro dell'opuscolo di informazioni per i genitori li aiuta a rispettare i tempi consigliati per l'applicazione quotidiana.



Benvenuti nel punto vendita per rivenditori
Sameda

www.semedapiedetorto.it

Come medico o tecnico ortopedico potete ordinare i nostri prodotti facilmente e comodamente nel nostro punto vendita online. Registrarsi è facilissimo: Richiedete il vostro accesso personale al nostro sito Internet e saremo lieti di attivare il vostro account.

I vantaggi per voi - Che cosa troverete nel nostro punto vendita online

- Una panoramica rapida di tutti i prodotti
- Le condizioni di fornitura riservate a voi dopo aver effettuato l'accesso
- Ordini 24 ore su 24, 24/7
- Accesso alla cronologia degli ordini effettuati

Ecco come funziona - ottenete la vostra password personale!

- 1) Inviare un'email, indicando "Shop" nell'oggetto, a it@semeda.de.
- 2) Riceverete una risposta via email con la vostra password personale.
- 3) A questo punto potete accedere con il vostro indirizzo email e con la vostra password a www.semedapiedetorto.it e iniziare.

Aperto a tutti i canali di ordinazione

Ovviamente potete sempre ordinare per telefono o via email.

Ordini telefonici: **+49-(0)5824 98 555-10**

Ordini via email: order@semeda.de



Semededa GmbH

Am Petersberg 36
D-29389 Bad Bodenteich
Deutschland/Germania

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0
Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

Mail: info@semmeda.de
Web: www.semmeda.de

